



Lock Taktik Turnike
CE



Biosys Biyomedikal
Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Organize Sanayi Bölgesi
Mevki 23 Küme Evleri No:4
İç kapı No:1 Beşiri/BATMAN

Telefon: 444 72 18

E-mail: info@biosys.com.tr

Website: www.biosysmed.com

Amaçlanan Kullanım

LOCK® Taktik Turnike, travmatik ekstremitelerde kanamalarında arteriyel kan akışını geçici olarak durdurmak amacıyla tasarlanmış mekanik bir kanama kontrol cihazıdır.

Ürün; kol ve bacaklarda meydana gelen, hayati risk oluşturan şiddetli kanamaların hızlı, etkili ve güvenli şekilde kontrol altına alınması amacıyla geliştirilmiştir.

UYARI



Yalnızca ciddi ve kontrol altına alınamayan ekstremitelerde kanamalarında kullanınız.

Cihaz boyun, gövde veya turnike uygulamasına uygun olmayan anatomik bölgelerde kullanılmamalıdır.

Ürün tek kullanımlıktır ve yeniden kullanılmamalıdır.

Turnikeyi boyun, gövde, eklem bölgelerine (dirsek, diz) ve anatomik olarak uygulanması uygun olmayan bölgelere uygulamayınız.

Turnike uygulama saati mutlaka kayıt altına alınmalı ve hasta mümkün olan en kısa sürede ileri tıbbi müdahaleye yönlendirilmelidir.

UYARI



Yaralanma bölgesinin yaklaşık 5–7 cm üstüne yerleştiriniz.
Uygulama saatini mutlaka kaydediniz.
Uzun süreli uygulamalar doku hasarına yol açabilir.

Ambalajı hasarlı, fiziksel bütünlüğü bozulmuş veya zarar görmüş ürünler kullanılmamalıdır.

Turnike, sağlık personeli müdahalesi olmadan gevşetilmemelidir.
Yaralı kişi en kısa sürede tıbbi yardım almalıdır.

Ürünü temiz ve kuru ortamda muhafaza ediniz.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Acil durumlar için erişilebilir ve kullanıma hazır şekilde saklayınız.

UYARI



Kanamanın kaynağını değerlendirmek için Yeterli zamanın olmadığı veya durumun buna izin vermediği durumlarda, turnike kol veya bacak üzerine mümkün olan en yüksek seviyeye uygulanabilir.

Turnike giysi üzerinde veya sert cisimlerin üzerine uygulanmamalıdır.

Kullanım sonrası biyolojik atık prosedürlerine uygun şekilde imha ediniz.

Uzun süreli turnike uygulamaları sinir, kas ve damar hasarına neden olabilir.

Turnike yalnızca hayatı tehdit eden kanamaların kontrolü amacıyla kullanılmalıdır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Biosys veya onun adına hareket eden herhangi bir kişi ya da kuruluş, ürünün kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, yaralanma veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Ürünün uygun şekilde kullanılması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Üretici firma, ürünün yanlış, uygunsuz veya kullanım talimatları dışında kullanılmasından kaynaklanan sonuçlarla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Teknik Özellikler

Ürün Tipi: Mekanik Turnike

Kullanım: Tek Kullanımlık

Yapı: Yüksek dayanımlı tekstil, polimer malzeme ve metal bileşenler

Maksimum Ağırlık: 85 gram

Kemer Uzunluğu: 90 Cm



CE İşareti



Üretim Tarihi



Üretici



Son Kullanma Tarihi



Tıbbi Cihaz



Tek Kullanımlıktır



Katalog Numarası



Benzersiz Cihaz Kimliği



Parti Kodu



Uyarı



Kullanım Talimatını İnceleyiniz

1




Kemeri kolun etrafına sıkıca sarın. Kayışın sıkıca çekilmesi, kayış ile cilt arasında 3 parmakdan fazlası giremeyecek olması demektir. Doğru yere geldiğinde kemeri sıkıca sabitleyin.

Ekstremiten arasına parmaklarınız girmiyorsa yeterince sıkıdır.


2

Şimdi çubuğu döndürün.

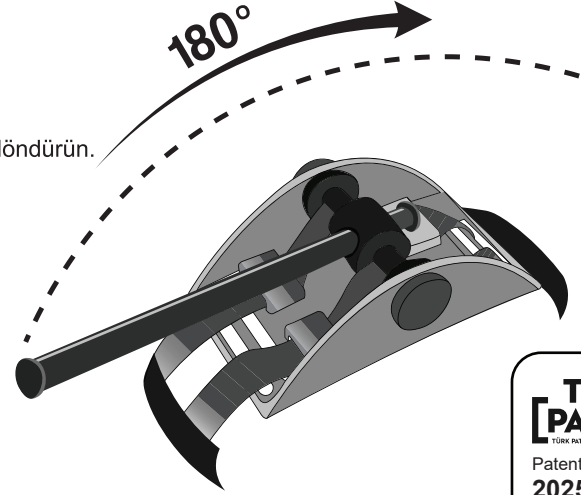

**TÜRK
[PATENT]**
TÜRK PATENT VE HAKKAR KURUMU
Patent No:
2025/013018


3

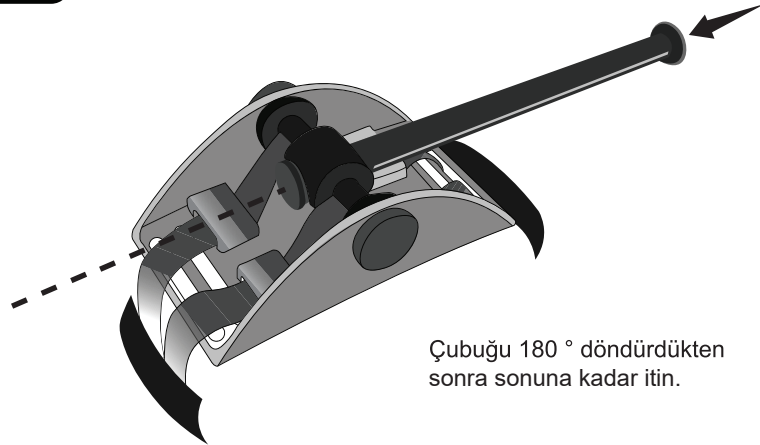

Çubuğu 180 ° döndürdükten sonra sonuna kadar itin.

4

Kanama durana kadar ve distal nabız kesilene kadar bunu sürdürün. Kitlemenize gerek yoktur.

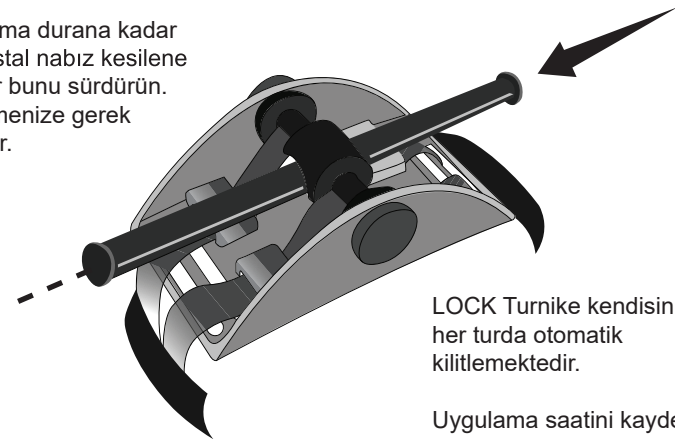

LOCK Turnike kendisini her turda otomatik kilitlemektedir.

Uygulama saatini kaydedin.